



ԱԿԱՆՋԱՊԻՏԱԿԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



WITH FUNDING FROM
AUSTRIAN
DEVELOPMENT
COOPERATION





**Ինչպե՞ս ճիշտ ընտրել
ականջի այն հատվածը,
որտեղ պետք է կատարել
համարակալում**



Նկ.1. ԽԵԿ-ի ականջախեցու աճառային գալարն ունի երեք ճյուղավորում՝ 1. ականջախեցու ստորին կողմնային զույգ, 2. ականջախեցու միջնային (մեդիալ) զույգ, որը հանդես է գալիս որպես ականջախեցու աճառային գալարի առանցք, 3. ականջախեցու վերին կողմնային զույգ:

Նկարում կանաչ հորիզոնական գծերով պատկերված են ականջախեցու աճառային զուլավորումները: Ականջապիտակը ամրացվում է ականջախեցու ստորին կողմնային և միջնային զույգերի մեջտեղում (1, 2):



Նկ. 2. Ականջախեցու ներքին մակերեսը գծանշում ենք երկու ուղղահայաց գծերով՝ բաժանելով այն 3 հավասար հատվածների, ապա ընտրում մեջտեղի հատվածը:



Նկ. 3. Կարմիրով նշմարված է այն հատվածը, որտեղ պետք է կատարել սկանջապիտակի դակում: Սկանջապիտակը այս հատվածում կլինի լավ տեսանելի, չի վնասի արյունատար անոթները և նյարդերը:

ԱԿԱՆՋԱՊԻՏԱԿԻ ՆԱԽԱՊԱՐՏԱՍՏՈՒՄ




Քայլ 1. 70%-անոց բժշկական սպիրտով ախտահանել դակիչը և ականջապիտակը:



Քայլ 2. Ականջապիտակի առջևի հատվածը ամրացնել դակիչի ասեղին: Սեղմել այն, որպեսզի համոզվեք, որ ականջապիտակը ամրացված է ասեղին: Այն հատվածը, որտեղ ամրացրել էիք ականջապիտակի առջևի հատվածը, ախտահանել 70%-անոց բժշկական սպիրտով, վրան քսել վազելին կամ հականեխիչ քսուք, օրինակ՝ լւոմիկոլ):



Քայլ 3. Բորբոքումներից խուսափելու համար ախտահանել ականջի ներսի և դրսի մակերեսները և մշակել 70%-անոց բժշկական սպիրտով: Ընտրել մեջտեղի հատվածը և կատարել դակում:

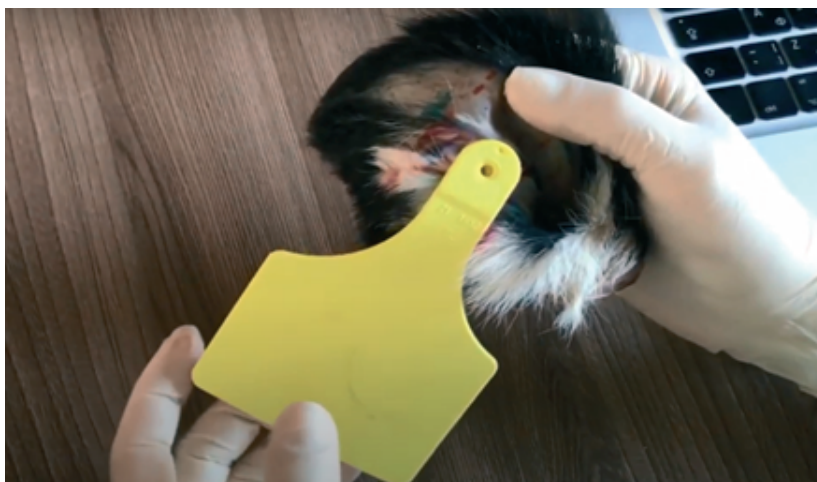

Քայլ 4. Պտտել ականջապիտակը համոզվելու համար, որ այն ամուր ամրացված է:



Քայլ 5. Ստուգել ականջապիտակի հետին հատվածի ամրությունը:

Քայլ 6. Կրկնել գործողությունները մյուս ականջի վրա՝ նախօրոք ախտահանելով դակիչը և ականջապիտակները:



Տպագրվել է «Անտարես» հրատարակչատանը